


	ArthrYS	 1434
Nízkomolekulární peptidy (LWP) odvozené z hydrolyzovaného kolagenu pro infiltrativní použití		Datum: 20-01-2025 Rev. 01
INFORMACE PRO PACIENTY		Pag.1 di 2

ARTHRYS - INFORMACE PRO PACIENTA - MEZINÁRODNÍ IMPLANTÁTU

V souladu s článkem 18 nařízení 2017/745

Jazyk: čeština

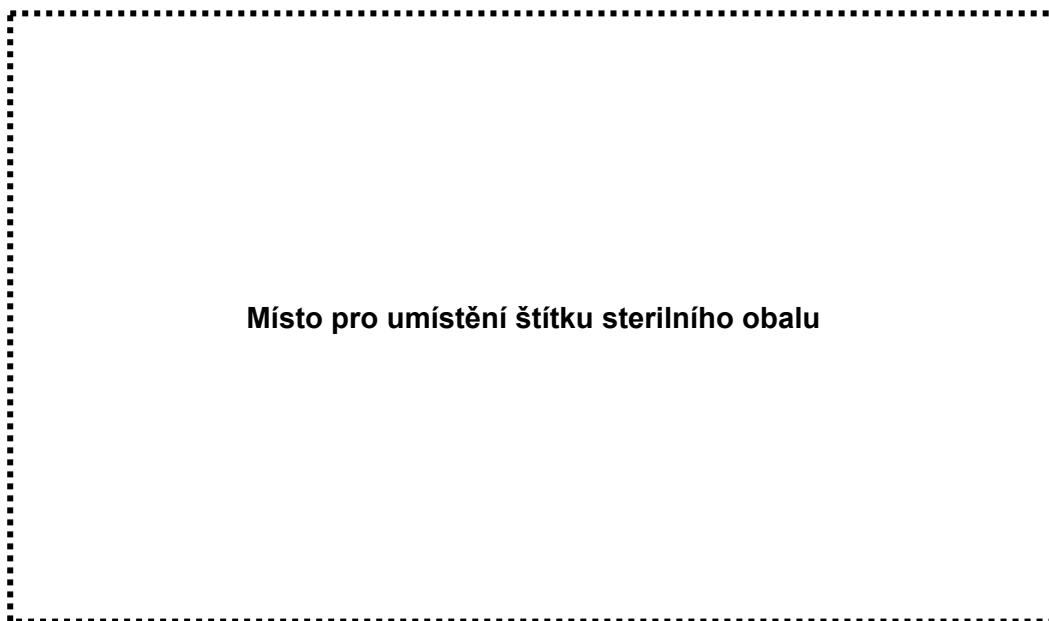

Místo pro umístění štítku sterilního obalu



TYP PŘÍSTROJE: (En) Kolagenový

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY:

Po injekci je vhodné několik hodin odpočívat a v následujících 24 hodinách se vyvarovat fyzické námahy nebo nadměrného cvičení. Bezprostředně po injekci přípravku ArthrYS se doporučuje použít na ošetřené místo led (po dobu asi 20 minut), aby se předešlo zánětlivým reakcím.

ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ:

Vzhledem k tomu, že ArthrYS je resorbovatelný injekční prostředek, dochází k jeho degradaci a resorpci, pokud neexistují vnější faktory, které by ji urychlily nebo oddálily, mezi 14. a 28. dnem po implantaci a závisí na době potřebné k tomu, aby se vstřebal na úrovni buněk pojivové tkáně (např. fibroblastů, chondrocytů atd.) a byl odpovídajícím způsobem metabolizován.

SLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ:

Součásti, které tvoří zařízení, jsou uvedeny v následující tabulce:

Komponenta	Funkční popis
Kolagenní peptidy	Nízkomolekulární peptidy odvozené z hydrolyzovaného hovězího kolagenu podporují kolagenovou matici pojivových a epitelových tkání, které jsou poškozeny stárnutím, degenerativními a zánětlivými patologiemi nebo po úrazech.
Fyziologický roztok	Fosfátový pufovaný roztok (PBS pH 7,1-7,7) jako vodný roztok.
Vitamin C	Vitamin C (stabilizovaná kyselina askorbová ve formě magnesium-askorbyl-fosfátu, MAP) nijak neinteraguje s kolagenní složkou; jeho přítomnost v přípravku má výhradně funkci ochrany peptidů před degradací v důsledku sterilizace gama zářením.

	Arthrlys	 1434
Nízkomolekulární peptidy (LWP) odvozené z hydrolyzovaného kolagenu pro infiltrativní použití	Datum: 20-01-2025	Rev. 01
INFORMACE PRO PACIENTY	Pag.2 di 2	


INTERNATIONAL IMPLANT CARD









www.tissyou.com/patient-info



SYMBOLY:

V následující tabulce je uveden význam symbolů uvedených na kartě implantátu:

	<i>Výrobce</i>
	<i>Katalogové číslo</i>
	<i>Kód dávky</i>
	<i>Název zdravotnického prostředku</i>
	<i>UDI jako formát AIDC</i>
	<i>Datum implantace</i>
	<i>Jméno pacienta nebo ID pacienta</i>
	<i>Název a adresa implantujícího zdravotnického zařízení/poskytovatele zdravotní péče</i>
	<i>Webové stránky s informacemi pro pacienty</i>