


	Arthrys	
No hidrolizēta kolagēna iegūti zemas molekulmasas peptīdi (ZMP) infiltratīvai lietošanai	Datums: 20-01-2025	Rev. 01
INFORMĀCIJA PACIENTAM	Pag.1 di 2	

ARTHRYS - INFORMĀCIJA PACIENTAM - STARPTAUTISKĀ IMPLANTU

Saskaņā ar Regulas 2017/745 18. pantu

Valoda: latviešu

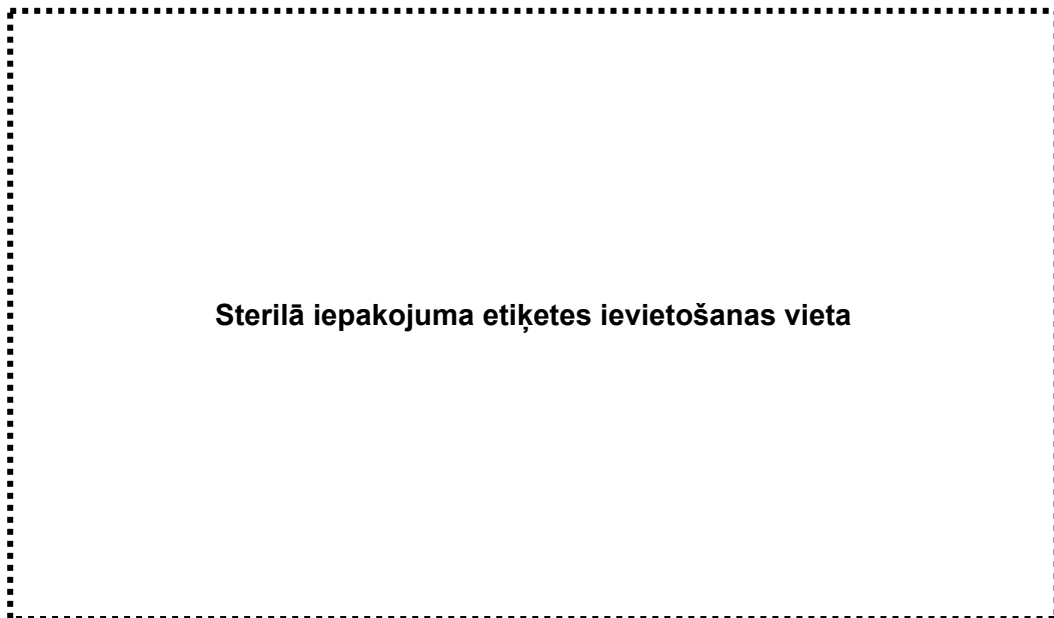

Sterilā iepakojuma etiķetes ievietošanas vieta



IERĪCES VEIDS: (En) Kolagēna

BRĪDINĀJUMI PACIENTIEM:

Pēc injekcijas ieteicams dažas stundas atpūsties un turpmāko 24 stundu laikā izvairīties no fiziskas slodzes vai pārmērīgas fiziskas slodzes. Lai novērstu iekaisuma reakcijas, uzreiz pēc Arthrys injekcijas (apmēram 20 minūtes) uz ārstētās vietas ieteicams lietot ledu.

IERĪCES DARBMŪŽS:

Tā kā Arthrys ir resorbējama injicējama ierīce, tās degradācija un resorbcija, ja nav ārējo faktoru, kas to paātrina vai aizkavē, notiek no 14 līdz 28 dienām pēc implantācijas un ir atkarīga no laika, kas nepieciešams, lai tā uzsūktos saistaudu šūnu (piemēram, fibroblastu, hondrocītu u. c.) līmenī un attiecīgi tiktu metabolizēta.

IERĪCES SASTĀVS:

Ierīces sastāvdaļas ir uzskaitītas šajā tabulā:

Sastāvdaļa	Funkcionālais apraksts
Kolagēna peptīdi	No hidrolizēta liellopu kolagēna iegūti mazmolekulāri peptīdi, kas atbalsta saistaudu un epitēlija audu kolagēna matricu, kas novecošanās vai deģeneratīvu un iekaisuma patoloģiju dēļ, vai pēc traumām ir bojāta.
Fizioloģiskais šķīdums	Fosfātu buferētais sāls šķīdums (PBS pH 7,1-7,7) kā ūdens šķīdums.
C vitamīns	C vitamīns (stabilizēta askorbīnskābe magnija askorbilfosfāta formā, MAP) nekādā veidā neietekmē kolagēna komponentu; tā klātbūtnei preparātā ir tikai un vienīgi funkcija aizsargāt peptīdus no sabrukšanas, ko izraisa sterilizācija ar gamma apstarošanu.

	Arthrys	
No hidrolizēta kolagēna iegūti zemas molekulmasas peptīdi (ZMP) infiltratīvai lietošanai		Datums: 20-01-2025
INFORMĀCIJA PACIENTAM		Rev. 01
		Pag.2 di 2


INTERNATIONAL IMPLANT CARD








www.tissyou.com/patient-info



SIMBOLI:

Tālāk tabulā ir norādīta uz implanta kartes attēloto simbolu nozīme:

	<i>Ražotājs</i>
	<i>Kataloga numurs</i>
	<i>Partijas kods</i>
	<i>Medicīniskās ierīces nosaukums</i>
	<i>UDI kā AIDC formāts</i>
	<i>Implantācijas datums</i>
	<i>Pacienta vārds vai pacienta ID</i>
	<i>Veselības aprūpes iestādes/piegādātāja, kas veic implantāciju, nosaukums un adrese</i>
	<i>Informācijas vietne pacientiem</i>