


	ArthrYS	
Peptydy o niskiej masie cząsteczkowej (LWP) pochodzące z hydrolizowanego kolagenu do stosowania naciekowego	Data: 20-01-2025	Rev. 01
INFORMACJE O PACJENCIE	Pag.1 di 2	

ARTHRYS - INFORMACJE DLA PACJENTA - MIĘDZYNARODOWA IMPLANTU

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia 2017/745

Język: Polski

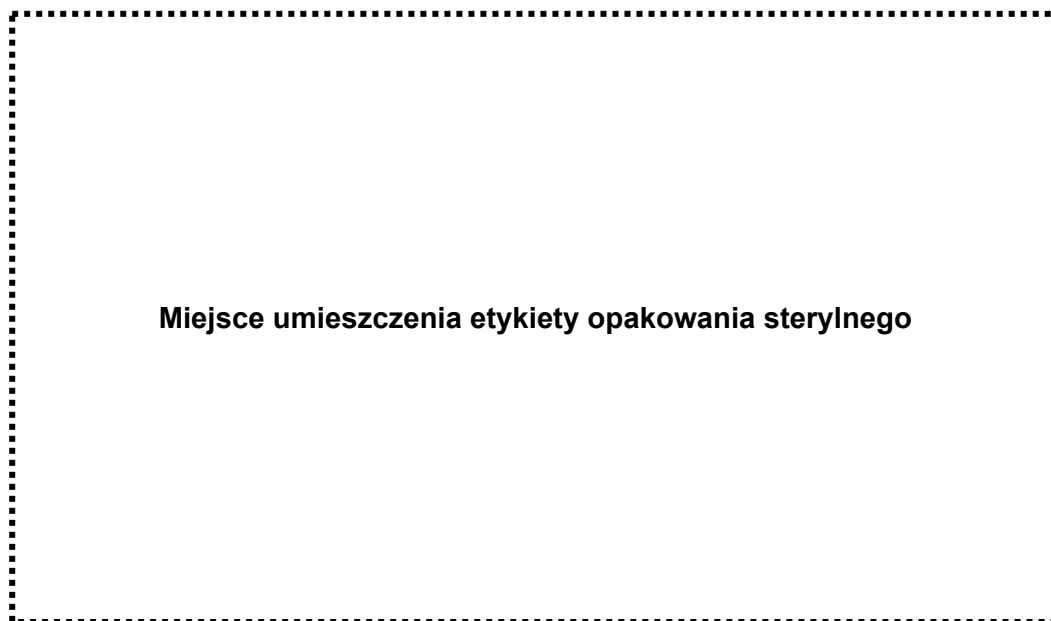

Miejsce umieszczenia etykiety opakowania sterylnego



TYP URZĄDZENIA: (En) kolagenu

OSTRZEŻENIA DLA PACJENTÓW:

Zaleca się kilka godzin odpoczynku po wstrzyknięciu i unikanie wysiłku fizycznego lub nadmiernych ćwiczeń w ciągu następnych 24 godzin. Zaleca się stosowanie lodu bezpośrednio po wstrzyknięciu produktu ArthrYS (przez około 20 minut) w leczonym miejscu, aby zapobiec reakcjom zapalnym.

ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA:

Ponieważ ArthrYS jest resorbowalnym wyrobem do wstrzykiwań, jego degradacja i resorpcja, przy braku czynników zewnętrznych przyczyniających się do jej przyspieszenia lub opóźnienia, następuje między 14 a 28 dniem po implantacji i zależy od czasu potrzebnego do wchłonięcia na poziomie komórek tkanki łącznej (np. fibroblastów, chondrocytów itp.) i odpowiedniego metabolizmu.

SKŁAD URZĄDZENIA:

Elementy składające się na urządzenie są wymienione w poniższej tabeli:

Komponent	Opis funkcji
Peptydy kolagenowe	Peptydy o niskiej masie cząsteczkowej pochodzące z hydrolizowanego kolagenu bydlęcego wspierają macierz kolagenową tkanek łącznych i nabłonkowych, które są uszkodzone z powodu starzenia się lub uszkodzone z powodu patologii zwyrodnieniowych i zapalnych lub po urazach.
Roztwór soli fizjologicznej	Roztwór soli fizjologicznej buforowany fosforanami (PBS pH 7,1-7,7) jako roztwór wodny.
Witamina C	Witamina C (stabilizowany kwas askorbinowy w postaci fosforanu magnezowo-askorbylowego, MAP) nie wchodzi w żadne interakcje ze składnikiem kolagenowym;

	Arthrys	
Peptydy o niskiej masie cząsteczkowej (LWP) pochodzące z hydrolizowanego kolagenu do stosowania naciekowego		Data: 20-01-2025 Rev. 01
INFORMACJE O PACJENCIE		Pag.2 di 2

	jej obecność w preparacie ma wyłączną funkcję ochrony peptydów przed degradacją w wyniku sterylizacji promieniowaniem gamma.
--	--


INTERNATIONAL IMPLANT CARD








www.tissyou.com/patient-info



SYMBOLE:

Poniższa tabela przedstawia znaczenie symboli wyświetlanych na karcie implantu:

	<i>Producent</i>
	<i>Numer katalogowy</i>
	<i>Kod partii</i>
	<i>Nazwa urządzenia medycznego</i>
	<i>UDI jako format AIDC</i>
	<i>Data implantacji</i>
	<i>Imię i nazwisko lub identyfikator pacjenta</i>
	<i>Nazwa i adres placówki medycznej/świadczeniodawcy dokonującego implantacji</i>
	<i>Strona internetowa z informacjami dla pacjentów</i>