


	Arthrlys	
Peptide cu greutate moleculară mică (LWP) derivate din collagen hidrolizat pentru utilizare infiltrativă	Data: 20-01-2025	Rev. 01
INFORMAȚII PENTRU PACIENT	Pag.1 di 2	

ARTHRYS - INFORMAȚII PENTRU PACIENT - INTERNAȚIONAL DE IMPLANT

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul 2017/745

Limba: Română

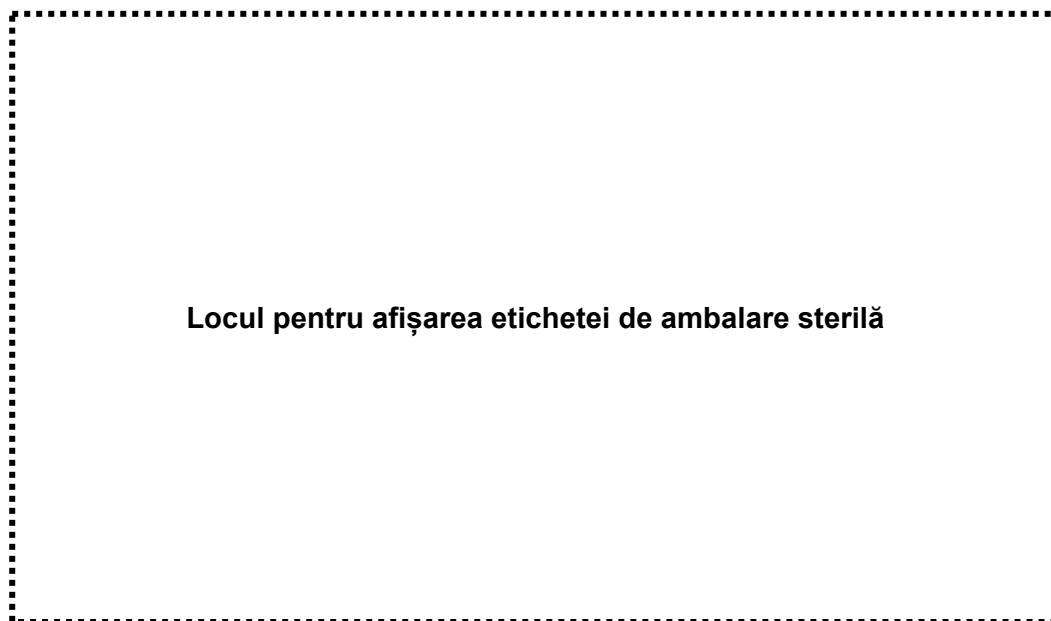

Locul pentru afișarea etichetei de ambalare sterilă



TIP DE DISPOZITIV: (En) Collagen

AVERTISMENTE PENTRU PACIENȚI:

Este recomandabil să vă odihniți câteva ore după injectare și să evitați eforturile fizice sau exercițiile fizice excesive în următoarele 24 de ore. Se recomandă utilizarea de gheață imediat după injectarea Arthrlys (timp de aproximativ 20 de minute) pe locul tratat pentru a preveni reacțiile inflamatorii.

DURATA DE VIAȚĂ A DISPOZITIVULUI:

Deoarece Arthrlys este un dispozitiv injectabil resorbabil, degradarea și resorbția sa, în absența factorilor externi care contribuie la accelerarea sau întârzierea acesteia, are loc între 14 și 28 de zile după implantare și depinde de timpul necesar pentru a fi absorbit la nivelul celulelor țesutului conjunctiv (de exemplu, fibroblaste, condrocite etc.) și metabolizat în consecință.

COMPOZIȚIA DISPOZITIVULUI:

Componentele care alcătuiesc dispozitivul sunt enumerate în tabelul următor:

Componentă	Descriere funcțională
Peptide de collagen	Peptidele cu greutate moleculară mică derivate din collagen bovin hidrolizat susțin matricea de collagen a țesuturilor conjunctive și epiteliale care sunt deteriorate din cauza îmbătrânirii sau deteriorate din cauza patologiilor degenerative și inflamatorii sau după evenimente traumatice.
Soluție salină	Soluție salină tamponată cu fosfat (PBS pH 7,1-7,7) ca soluție apoasă.
Vitamina C	Vitamina C (acid ascorbic stabilizat, sub formă de magneziu-ascorbil-fosfat, MAP) nu interacționează în niciun fel cu componenta collagen; prezența sa în formulă are rolul exclusiv de a proteja peptidele de degradarea datorată sterilizării prin iradiere gamma.

	Arthrys	
Peptide cu greutate moleculară mică (LWP) derivate din collagen hidrolizat pentru utilizare infiltrativă	Data: 20-01-2025	
	Rev. 01	
INFORMAȚII PENTRU PACIENT		Pag.2 di 2


INTERNATIONAL IMPLANT CARD









www.tissyou.com/patient-info



SIMBOLURI:

Tabelul următor prezintă semnificația simbolurilor afișate pe cardul de implant:

	<i>Producător</i>
	<i>Număr de catalog</i>
	<i>Codul lotului</i>
	<i>Denumirea dispozitivului medical</i>
	<i>UDI ca format AIDC</i>
	<i>Data implantării</i>
	<i>Numele pacientului sau ID-ul pacientului</i>
	<i>Numele și adresa instituției/furnizorului de servicii medicale care efectuează implantarea</i>
	<i>Site de informare a pacienților</i>