


	Arthrlys	
Nízkomolekulárne peptidy (LWP) získané z hydrolyzovaného kolagénu na infiltratívne použitie	Dátum: 20-01-2025	Rev. 01
INFORMÁCIE PRE PACIENTOV	Pag.1 di 2	

ARTHRYS - INFORMÁCIE PRE PACIENTA - MEDZINÁRODNÁ IMPLANTÁTU

V súlade s článkom 18 nariadenia 2017/745

Jazyk: slovenčina

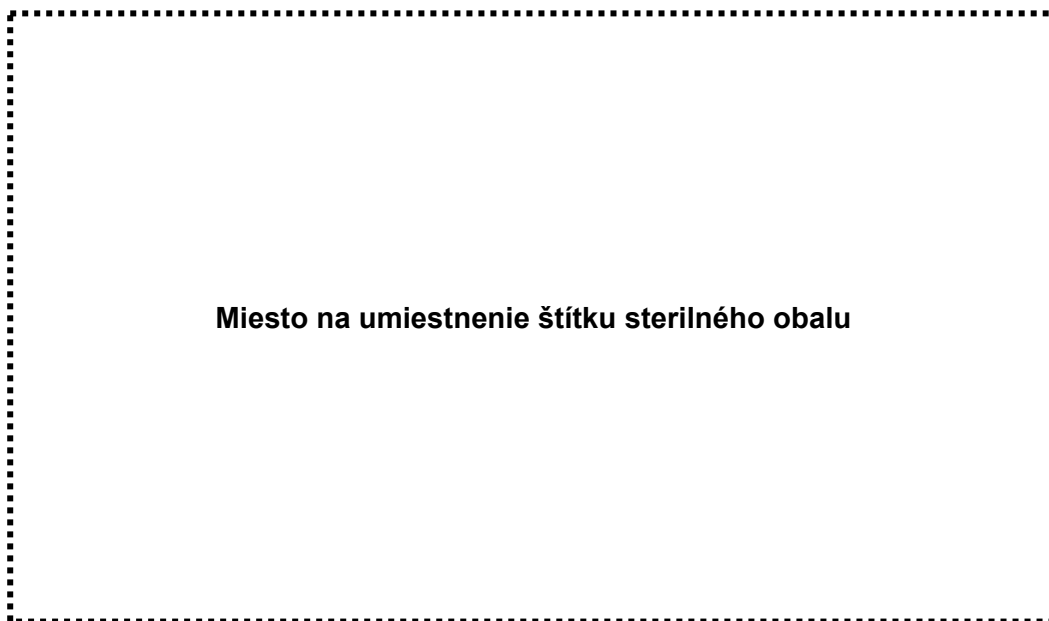

Miesto na umiestnenie štítku sterilného obalu



TYP ZARIADENIA: (En) Kolagénny

UPOZORNENIA PRE PACIENTOV:

Po injekcii sa odporúča niekoľko hodín odpočívať a počas nasledujúcich 24 hodín sa vyhnúť fyzickej námahe alebo nadmernému cvičeniu. Odporúča sa použiť ľad bezprostredne po injekcii Arthrlysu (približne 20 minút) na ošetrované miesto, aby sa zabránilo zápalovým reakciám.

ŽIVOTNOSŤ ZARIADENIA:

Keďže Arthrlys je resorbovateľná injekčná pomôcka, jej degradácia a resorpcia, ak neexistujú vonkajšie faktory, ktoré by ju urýchlili alebo oddiaľovali, nastáva medzi 14. a 28. dňom po implantácii a závisí od času potrebného na jej vstrebávanie na úrovni buniek spojivového tkaniva (napr. fibroblastov, chondrocytov atď.) a na jej následný metabolizmus.

ZLOŽENIE ZARIADENIA:

Komponenty, ktoré tvoria zariadenie, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Komponent	Funkčný opis
Kolagénové peptidy	Nízkomolekulárne peptidy odvodené z hydrolyzovaného hovädzieho kolagénu podporujú kolagénovú maticu spojivových a epitelových tkanív, ktoré sú poškodené starnutím, degeneratívnymi a zápalovými patológiami alebo po úrazoch.
Fyziologický roztok	Fosfátový tlmivý roztok (PBS pH 7,1-7,7) ako vodný roztok.
Vitamín C	Vitamín C (stabilizovaná kyselina askorbová vo forme magnéziu-askorbyl-fosfátu, MAP) nijako neinteraguje s kolagénovou zložkou; jeho prítomnosť v prípravku má výlučnú funkciu ochrany peptidov pred degradáciou v dôsledku sterilizácie gama žiarením.

	Arthrlys	 1434
Nízkomolekulárne peptidy (LWP) získané z hydrolyzovaného kolagénu na infiltratívne použitie		Dátum: 20-01-2025
INFORMÁCIE PRE PACIENTOV		Rev. 01
		Pag.2 di 2


INTERNATIONAL IMPLANT CARD









www.tissyou.com/patient-info



SYMBOLY:

V nasledujúcej tabuľke je uvedený význam symbolov uvedených na karte implantátu:

	<i>Výrobca</i>
	<i>Katalógové číslo</i>
	<i>Kód dávky</i>
	<i>Názov zdravotníckeho zariadenia</i>
	<i>UDI ako formát AIDC</i>
	<i>Dátum implantácie</i>
	<i>Meno pacienta alebo ID pacienta</i>
	<i>Názov a adresa implantujúceho zdravotníckeho zariadenia/poskytovateľa</i>
	<i>Webová stránka s informáciami pre pacientov</i>