


	Arthrys	
İnfiltratif kullanım için hidrolize kolajenden türetilen düşük moleküler ağırlıklı peptitler (LWP'ler)		Tarih: 20-01-2025
		Rev. 01
HASTA BİLGİLERİ		Pag.1 di 2

ARTHRYS - HASTA İÇİN BİLGİLER - ULUSLARARASI İMPLANT
2017/745 sayılı Tüzüğün 18. maddesi uyarınca

Dil Türkçe

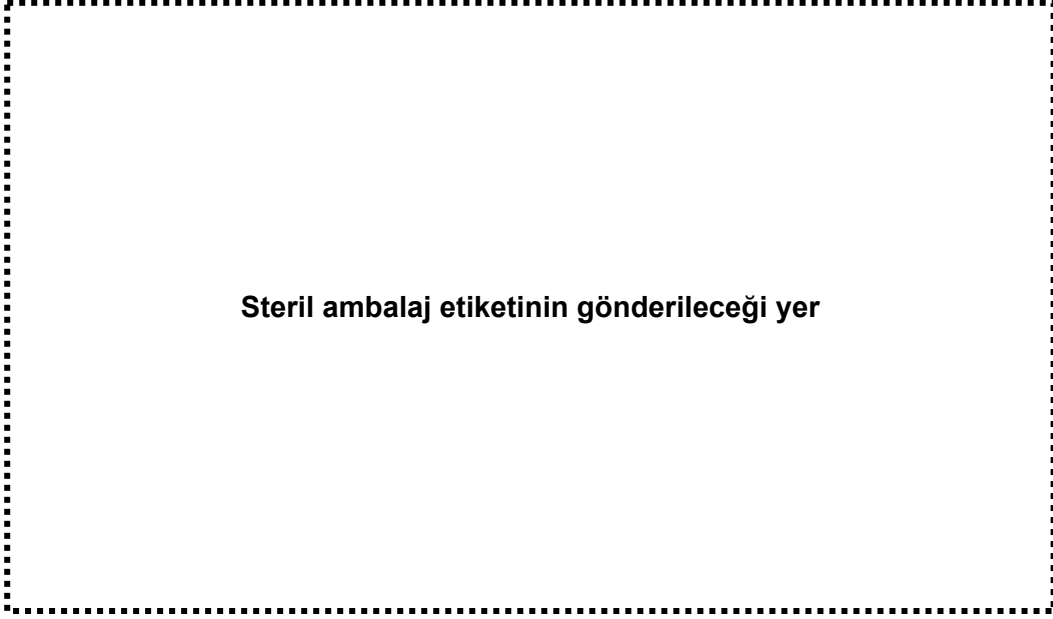

Steril ambalaj etiketinin gönderileceği yer



CİHAZ TÜRÜ: (En) Kolajen

HASTA UYARILARI:

Enjeksiyondan sonra birkaç saat dinlenilmesi ve takip eden 24 saat içinde fiziksel efordan veya aşırı egzersizden kaçınılması tavsiye edilir. Enflamasyon reaksiyonlarını önlemek için Arthrys enjeksiyonundan hemen sonra (yaklaşık 20 dakika boyunca) tedavi edilen bölgede buz kullanılması önerilir.

CİHAZ ÖMRÜ:

Arthrys emilebilir enjekte edilebilir bir cihaz olduğundan, bozunması ve emilmesi, hızlandırmaya veya geciktirmeye katkıda bulunan dış faktörlerin yokluğunda, implantasyondan sonraki 14 ila 28 gün arasında gerçekleşir ve bağ dokusu hücreleri (örn. fibroblastlar, kondrositler, vb.) düzeyinde emilmesi ve buna göre metabolize edilmesi için gereken süreye bağlıdır.

CİHAZ BİLEŞİMİ:

Cihazı oluşturan bileşenler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Bileşen	Fonksiyonel Tanım
Kolajen peptitler	Hidrolize sığır kolajeninden elde edilen düşük molekül ağırlıklı peptitler, yaşlanma nedeniyle bozulan veya dejeneratif ve enflamatuvar patolojiler nedeniyle veya travmatik olaylardan sonra hasar gören bağ ve epitel dokularının kolajen matrisini destekler.
Tuzlu su çözeltisi	Sulu çözelti olarak fosfat tamponlu tuzlu su çözeltisi (PBS pH 7.1-7.7).
C Vitamini	C vitamini (magnezyum-askorbil-fosfat formunda stabilize askorbik asit, MAP) kolajen bileşeniyle hiçbir şekilde etkileşime girmez; formülasyondaki varlığı, peptitleri gama ışınlanmasıyla sterilizasyona bağlı bozulmadan korumak gibi özel bir işleve sahiptir.

	Arthrlys	
İnfiltratif kullanım için hidrolize kolajenden türetilen düşük moleküler ağırlıklı peptitler (LWP'ler)		Tarih: 20-01-2025
		Rev. 01
HASTA BİLGİLERİ		Pag.2 di 2

**INTERNATIONAL IMPLANT CARD**

? _____

31 _____

+ _____

www.tissyou.com/patient-info

**SEMBOLLER:**

Aşağıdaki tabloda implant kartı üzerinde gösterilen sembollerin anlamları gösterilmektedir:

	Üretici firma
	Katalog numarası
	Toplu kod
	Tıbbi Cihaz Adı
	AIDC formatı olarak UDI
	İmplantasyon tarihi
 ?	Hasta Adı veya hasta kimliği
 +	İmplant eden sağlık kuruluşunun/sağlayıcının adı ve adresi
	Hasta Bilgilendirme Web Sitesi